

ALLERGOCOVER® Español

Instrucciones generales

ALLERGOCOVER® es una funda intermedia con la que se cubren por completo colchones, mantas y cojines, de manera que se crea una barrera entre los ácaros, sus alérgenos y el alérgico. Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® están compuestas de un tejido de microfibras tupido, sin recubrimiento (100% poliéster, tejido con hilos de carbono). Este tejido de alta tecnología, que fue desarrollado para alérgicos a los ácaros del polvo doméstico y asmáticos, ha demostrado su eficacia gracias a las siguientes propiedades:

- Descenso significativo de los síntomas alérgicos avalado por estudios clínicos^[1,2]
- 93 % de los usuarios califican el uso de ALLERGOCOVER® como bueno^[2]
- 77 % de los proveedores y farmacias eligen y recomiendan ALLERGOCOVER®^[3]

La extraordinaria capacidad de retención de partículas impide la liberación y la inhalación de alérgenos. Gracias a la gran permeabilidad al vapor de agua y al aire no sólo queda garantizado un gran confort al dormir, sino la aireación del colchón. El tejido ALLERGOCOVER® se fabrica a conciencia con una superficie lisa para que los ácaros no colonicen el material mismo. La cremallera especial utilizada en ALLERGOCOVER® y la lengüeta protectora interior impiden que pasen ácaros a través del cierre y que penetren en el tejido. Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® representan, por tanto, un importante elemento terapéutico: permiten dormir tranquilo de nuevo y contribuyen de forma importante al proceso de curación. Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® también son adecuadas para enfermos de neurodermitis.

Uso

- Antes de abrir el envase:
Por favor, comprobar siempre las medidas (longitud x altura x anchura). Los artículos con el sellado higiénico dañado quedarán excluidos de cualquier derecho a devolución o cambio.
- Antes del primer uso, se recomienda lavar las fundas intermedias ALLERGOCOVER® con un detergente suave para que el material se ponga más blando.
- Recubrir los colchones, mantas, y cojines con las fundas intermedias ALLERGOCOVER®. En el caso de camas dobles, es aconsejable cubrir también la cama del acom-pañante, en el caso de niños alérgicos, cubrir también las camas de los adultos con las fundas intermedias ALLERGOCOVER®.
- Al cerrar las fundas asegurarse de que no quede tejido enganchado en la cremallera y de que la lengüeta protectora interior cubra la cremallera en toda su longitud.
- Si se utilizan fundas de colchón, asegurarse de que son muy permeables al aire y al vapor de agua.
- A continuación, cubrir, como de costumbre, los colchones, mantas y cojines con la ropa de cama.
- Para garantizar la mayor vida útil posible de las fundas intermedias ALLERGOCOVER® evitar puntos de fricción con partes de la cama de cantos vivos.
- Los colchones (en especial, colchones de látex) se deberían airear regularmente (semanalmente).
- Si se daña una funda intermedia ALLERGOCOVER®, ya no está garantizada su resistencia a los alérgenos y, por tanto, su eficacia. Por eso, las fundas intermedias ALLERGOCOVER® dañadas se tienen que reemplazar.



[1] Brehler R, Kniest F. Allergy Clin Immunol Int – J World Allergy Org 2006;18:15–19. [2] Müller-Scheven D, et al. Allergologie 1998;21:534-540. [3] Nielsen: Market share in pharmacies and their distribution MAT 9/2013.

ALLERGOCOVER® Español

Instrucciones de lavado

Antes del lavado, dar la vuelta a la funda intermedia ALLERGOCOVER® hacia la izquierda y cerrar la cremallera. Utilizar un detergente suave para mantener la elasticidad de las microfibras. Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® se secan en pocas horas, de manera que las fundas están de nuevo disponibles el mismo día. Las fundas intermedias ALLERGOCOVER®, no obstante, son aptas para secadoras (en el programa más suave).

Por favor, seguir las instrucciones de lavado cosidas a las fundas.

Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® se pueden lavar todo lo a menudo que se quiera.

Consejo: al quitar las fundas intermedias ALLERGOCOVER® el aire ambiente se contamina de nuevo con los alérgenos del colchón, la manta y los cojines. Por este motivo, recomendamos lavar las fundas intermedias ALLERGOCOVER® sólo cuando están muy sucias. Gracias a su superficie lisa, es posible el enjuagado con una lejía jabonosa suave y, en muchos casos, suficiente.

Garantía

Damos una garantía de 12 años por el material y la resistencia a los alérgenos de las fundas intermedias ALLERGOCOVER® siempre que su uso sea el correcto y se cumpla con las instrucciones de lavado.



Material y resistencia

- 100 % poliéster, cosido con hilo de carbono y, por tanto, no se desprenden partículas
- Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® se fabrican en Alemania bajo los procesos más modernos y respetuosos con el medioambiente.
- En la fabricación de las fundas intermedias ALLERGOCOVER® se evitan los aditivos químicos, como, p. e., abrillantadores ópticos.
- Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® están certificadas por Öko-Tex-Standard 100, clase de producto 1. Estos valores se verifican todos los años.
- Las fundas intermedias ALLERGOCOVER® se pueden tirar a la basura doméstica.
- El instituto alemán de control de calidad Stiftung Warentest ha certificado las fundas intermedias ALLERGOCOVER® con las "Bestnoten" (mejores notas) (3/2003).
- TÜV NORD otorgó en 2003 a las fundas intermedias ALLERGOCOVER® el certificado "Für Allergiker geeignet" ("Aptas para alérgicos").

