

ALLERGOCOVER® Français

Recommandations générales

ALLERGOCOVER® est une housse de protection intermédiaire qui recouvre complètement les matelas, les duvets et les oreillers, formant une barrière entre les acariens, leurs allergènes et le sujet allergique. Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® sont composées de microfibrilles tissées dense et sans enduction (100% polyester et parcourues de fils en fibre de carbone). Ce tissu de haute technologie a été mis au point pour les sujets allergiques aux acariens domestiques et pour les asthmatiques et il est doté des propriétés suivantes:

- Nette diminution des troubles, prouvée scientifiquement [1,2]
- 93 % des utilisateurs évaluent le confort de sommeil procuré par ALLERGOCOVER® comme étant bon [2]
- 77 % des personnes achetant des housses dans des pharmacies allemandes se décident en faveur d'ALLERGOCOVER® [3]

La capacité de retenue extrêmement élevée des particules empêche la libération et l'aspiration des allergènes. La haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau garantit non seulement un sommeil confortable mais également l'aération du matelas. Le tissu d'ALLERGOCOVER® est fabriqué consciemment avec une surface lisse pour empêcher l'infiltration des acariens dans le tissu. La fermeture éclair spéciale utilisée pour l'ALLERGOCOVER® et la languette de protection intérieure empêchent que les acariens ne s'envolent ou qu'ils ne pénètrent dans le tissu.

Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® représentent ainsi un composant thérapeutique important: vous pouvez à nouveau dormir plus calmement, ce qui facilite le processus de guérison. Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® conviennent également aux sujets atteints de neurodermatite.

Utilisation

- Avant d'ouvrir l'emballage: Veuillez absolument vérifier les dimensions (longueur x hauteur x largeur). La marchandise dont le label d'hygiène est endommagé, ne peut être ni reprise ni échangée.
- Avant la première utilisation, il est recommandé de laver les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® avec un produit de lessive pour linge fin pour que le tissu reste plus souple.
- Recouvrez vos matelas, vos duvets et vos oreillers de housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER®. En cas de lit double, il est utile d'envelopper aussi le lit jumeau, et si les enfants sont allergiques également les lits des parents.
- Lors de la fermeture des housses, veillez à ce que le tissu ne reste pas coincé dans la fermeture éclair et à ce que la languette de protection intérieure recouvre la fermeture éclair sur toute sa longueur.
- Si vous utilisez un protège-matelas, veillez à ce qu'il ait une haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Recouvrez ensuite les matelas, les duvets et les oreillers avec la literie habituelle.
- Pour garantir une durée de vie aussi longue que possible des housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER®, évitez les points de frottement avec les parties du lit à angles vifs.
- Les matelas, surtout lorsqu'ils sont en latex, devraient être régulièrement aérés (toutes les semaines).
- Si un matelas de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® est endommagé, l'efficacité liée à l'étanchéité aux allergènes n'est plus garantie. Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® doivent être par conséquent remplacées.



[1] Brehler R, Kniest F. Allergy Clin Immunol Int – J World Allergy Org 2006;18:15–19. [2] Müller-Scheven D, et al. Allergologie 1998;21:534-540. [3] Nielsen: Market share in pharmacies and their distribution MAT 9/2013.

ALLERGOCOVER® Français

Recommandations d'entretien

Avant de la laver, veuillez retourner la housse de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® et fermer la fermeture éclair. Veuillez utiliser un produit de lessive pour linge fin afin de conserver la souplesse de la microfibre. Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® sèchent en l'espace de quelques heures, si bien qu'après lavage les housses sont de nouveau disponibles le jour même. Les housses intermédiaires ALLERGOCOVER® peuvent également être séchées au sèche-linge (au niveau le plus bas).

Veuillez respecter les recommandations d'entretien cousues dans le tissu.

Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® sont lavables un grand nombre de fois.

Conseil: lorsque vous retirez la housse de protection intermédiaire ALLERGOCOVER®, l'air ambiant est de nouveau chargé d'allergènes provenant du matelas, du duvet et des oreillers. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne laver les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® que si elles sont particulièrement sales. L'essuyage humide avec de l'eau légèrement savonneuse est possible, et suffisant dans beaucoup de cas, grâce à la surface lisse.

Garantie

Nous vous accordons douze ans de garantie sur le matériau et l'étanchéité aux allergènes des housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® en cas d'utilisation conforme et de respect des recommandations d'entretien.



Matériau et tolérance

- 100 % polyester, parcouru de fils en fibre de carbone.
- Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® sont fabriquées en Allemagne selon un procédé moderne et respectueux de l'environnement.
- Pour la fabrication des housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER®, on a renoncé aux adjuvants chimiques, tels que par ex. les azurants optiques.
- Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® sont certifiées selon la norme Öko-Tex 100, classe de produit 1. Ces valeurs sont vérifiées chaque année.
- Les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® peuvent être éliminées avec les ordures ménagères.
- La fondation Stiftung Warentest a certifié les housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER®, leur attribuant les « meilleures notes » (3/2003).
- En 2003, le TÜV NORD a décerné aux housses de protection intermédiaire ALLERGOCOVER® le certificat « Convient aux sujets allergiques ».

