

# ALLERGOCOVER® Nederlands

## Algemene informatie

ALLERGOCOVER® is een hoes, waarmee matrassen, dekbedden en kussens compleet omhuld worden zodat er een barrière ontstaat tussen huisstofmijten, allergenen en de allergische patiënt. ALLERGOCOVER® hoezen zijn gemaakt van dicht geweven 100% polyester garen voorzien van koolstofdraad. Dit hightech weefsel werd speciaal ontwikkeld voor patiënten met een huisstofmijtallergie en heeft zijn waarde bewezen door de volgende eigenschappen:

- Significante vermindering van klachten aangetoond in wetenschappelijk onderzoek [1,2]
- 93 % van de gebruikers beoordelen het slaapcomfort van ALLERGOCOVER® als goed [2]
- 77 % van de kopers van allergeendichte hoezen in Duitse apotheken kiezen voor ALLERGOCOVER® [3]

Het buitengewoon hoge vermogen om deeltjes tegen te houden verhindert dat allergenen vrijkomen en ingeademd worden. Door de hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid bent u verzekerd van een hoog slaapcomfort. Het ALLERGOCOVER®-weefsel wordt bewust met een glad oppervlak gemaakt, zodat mijten zich niet in de stof zelf kunnen vestigen. De voor ALLERGOCOVER® gebruikte speciale ritssluiting en de binnen liggende beschermingsflap verhinderen dat door de afsluiting mijten ontsnappen of in het weefsel kunnen binnendringen.

ALLERGOCOVER® hoezen vormen zo een belangrijk onderdeel van de therapie: u kunt weer rustiger slapen, het helingproces wordt op doorslaggevende wijze gestimuleerd. Ook voor patiënten met neurodermitis zijn ALLERGOCOVER® hoezen geschikt.

## Gebruik

- Vooraleer de verpakking te openen: eerst de maten (lengte x hoogte x breedte) controleren. Verpakkingen met beschadigd hygiënezegel zijn van retourzending of vervanging uitgesloten.
- Voor het eerste gebruik raden wij aan ALLERGOCOVER® hoezen met een fijnwasmiddel te wassen, zodat de stof soepeler wordt.
- Matras, dekbed en kussen met ALLERGOCOVER® hoezen overtrekken. Wij adviseren u om ook het bed van de partner, en bij (jonge) allergische kinderen de bedden van de ouders, te voorzien van ALLERGOCOVER® hoezen.
- Let op bij het dichtritsen van de hoezen dat geen weefsel tussen de ritssluiting geklemd wordt en dat de binnenliggende beschermingsflap de ritssluiting in de volle lengte afdekt.
- Wanneer u matrasbeschermers gebruikt moet u op een hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid letten.
- Bedek uw matras, dekbed en kussen met ALLERGOCOVER® hoezen. Over de ALLERGOCOVER® hoezen maakt u uw bed met het normale beddegoed op.
- Om een zo lang mogelijke levensduur van de ALLERGOCOVER® hoezen te garanderen moet u contact met scherpe delen van het bed vermijden.
- Matrassen (in het bijzonder latexmatrassen) houden vocht vast, daarom moeten deze regelmatig (wekelijks) gelucht worden.
- Indien een ALLERGOCOVER® hoes beschadigd is, is de allergeendichtheid en daarmee de effectiviteit niet meer gegarandeerd. Beschadigde ALLERGOCOVER® hoezen moeten daarom onmiddellijk vervangen worden.



[1] Brehler R, Kniest F. Allergy Clin Immunol Int – J World Allergy Org 2006;18:15–19. [2] Müller-Scheven D, et al. Allergologie 1998;21:534-540. [3] Nielsen: Market share in pharmacies and their distribution MAT 9/2013.

# ALLERGOCOVER® Nederlands

## Onderhoudsinstructies

Voor het wassen draait u de ALLERGOCOVER® hoës binnenstebuiten en sluit u de ritssluiting. Gebruik een product voor fijne was om de soepelheid van de microvezels te behouden. ALLERGOCOVER® hoezen drogen binnen enkele uren, zodat de hoezen nog dezelfde dag opnieuw gebruikt kunnen worden. ALLERGOCOVER® hoezen zijn ook geschikt voor de droger (op het laagste niveau).

Zie ook de instructies op het ingenaaide wasetiket.

ALLERGOCOVER® hoezen kunnen zo dikwijls u wilt gewassen worden.

**Tip:** Bij het afhalen van de ALLERGOCOVER® hoezen wordt de omgeving opnieuw door allergenen uit matras, dekbed en kussen belast.

Daarom raden wij aan ALLERGOCOVER® hoezen alleen te wassen wanneer ze zeer vuil zijn. Reinigen met een vochtig doekje met een zachte zeep is dankzij het gladde oppervlak mogelijk en volstaat in veel gevallen.

## Garantie

U heeft 12 jaar garantie op het materiaal en de allergeendichtheid van de ALLERGOCOVER® hoezen bij correct gebruik en naleving van de onderhouds- en gebruiksinstructies.



## Materiaal en veiligheid

- 100 % polyester garen, voorzien van een koolstofdraad. Allergeendicht en anti-statisch.
- ALLERGOCOVER® hoezen worden volgens de modernste, milieuvriendelijkste procedés in Duitsland vervaardigd.
- Bij de vervaardiging van ALLERGOCOVER® hoezen worden geen chemische additieven, zoals optische witmakers, gebruikt.
- ALLERGOCOVER® hoezen zijn volgens de Öko-Tex-norm 100, produktklasse 1, gecertificeerd. Deze waarden worden jaarlijks gecontroleerd.
- ALLERGOCOVER® hoezen kunnen met het gewone huisvuil vernietigd worden.
- Stiftung Warentest (Duitse Consumentenbond) heeft ALLERGOCOVER® hoezen met de „hoogste beoordeling” gecertificeerd (3/2003).
- TÜV NORD heeft in 2003 aan de ALLERGOCOVER® hoezen het certificaat „geschikt voor allergische patiënten” verstrekt.

